

インターエアロゾル1mgをご使用になる患者の皆様へ

# ファイソンエアーを用いた吸入方法

専用アダプター接続口がある側の凹部と吸入口がある側の凸部を合わせて本体を組み立てます。



吸入口にはゴムバルブが取り付けられています。

〈ファイソンエアー本体〉 専用アダプター接続口



〔専用アダプターの1個は予備としてご使用ください。〕

インターエアロゾル1mgのアダプターに入っているお薬のポンベを取り出し、ファイソンエアーの専用アダプターにはめ込みます。



吸入は立ち上がって行きます。ファイソンエアーに息がかからないように口から十分に離し、息を大きく吐き出します。ファイソンエアーを水平にして、吸入口をくわえます。**ポンベの底を図の矢印の方向に強く1回押し、息を深く強く吸い込んでお薬を吸入します。**

専用アダプターのキャップを取りはずし、ポンベが飛び出さないように軽く手でおさえて上下に数回よく振ります。

**新しいポンベを使用する時は、最初の4回は空気中に噴霧してください。**

まわりに人がいないところで吸入口を外に向け、ポンベの底を下に強く4回押します。この時、吸入しないように注意してください。



吸い込んだら、ファイソンエアーを口から十分に離し、**5秒くらい息を止めます。**その後、息を吐き出します。この時、ファイソンエアーに息がかからないようにしてください。続けて、ファイソンエアーの吸入口をくわえ、**2、3回吸入します。**

専用アダプターをファイソンエアー本体に差し込みます。



**7** インターエアロゾル1mgは通常、1回に2噴霧分の吸入を行いますので、**5～6の動作をもう1度繰り返してください。**

- 吸入後は、うがいをする必要はありません。
- 吸入後、のどに軽い刺激がある時は、水を飲むと刺激はおさまります。


★次ページもお読みください。

インターエアロゾル1mgをご使用になる患者の皆様へ

# ファイソンエアーのお手入れ方法

ファイソンエアーは、専用アダプターと合わせて3日に1回洗浄し、完全に乾燥させてからご使用ください。お手入れは、下記の1～8の手順で行ってください。

ファイソンエアー本体から専用アダプターを取りはずします。

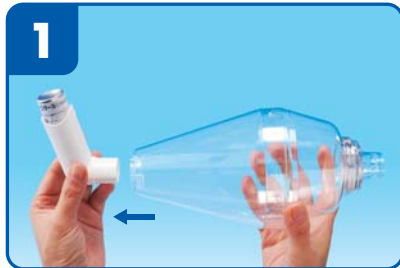

専用アダプターからお薬のポンベを取り出します。



ファイソンエアー本体は2つに分け、専用アダプターとともに、中性洗剤を入れたぬるま湯に15分くらい浸けます。



ファイソンエアー本体をぬるま湯ですすぎます。



本体の吸入口がある側は吸入口を取りはずし、中のゴムバルブまでよく洗ってください。



専用アダプターは、ポンベのはめ込み口側と吸入口側の両方から、それぞれ1分くらいずつぬるま湯ですすぎます。



洗った後は水気を振り払い、専用アダプター接続口を下にして立て、完全に自然乾燥させてください。



次の使用の前には、ゴムバルブを再び本体に取り付け、ご使用ください。本体にある突起2カ所にゴムバルブの穴を引っ掛け、その上から吸入口を取り付けます。

## ⚠ 気をつけていただきたいこと

- 初めて使用する時や、長期間使用しなかった後で使用する時には、必ず洗浄・乾燥を行ってからご使用ください。

★箱の中に説明書が入っていますので、使用前には必ずご覧ください。