


インタールエアロゾル1mgをご使用になる患者の皆様へ

# マイクロヘラーマスク付きを用いた吸入方法

インタールエアロゾル1mgのアダプターに入っているお薬のポンベを取り出し、マイクロヘラーマスク付きの専用アダプターにはめ込みます。

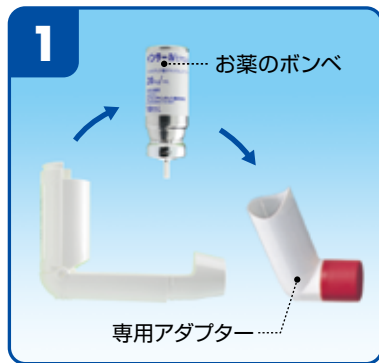

〈マイクロヘラーマスク付き本体〉



専用アダプターのキャップを取りはずし、ポンベが飛び出さないように軽く手でおさえて上下に数回よく振ります。



**新しいポンベを使用する時は、最初の4回は空気中に噴霧してください。**

まわりに人がいないところで吸入口を外に向け、ポンベの底を下に強く4回押します。この時、吸入しないように注意してください。



息を深く強く吸い込みながら、ポンベの底を図の矢印の方向に強く1回押し、お薬を吸入します。

専用アダプターをマイクロヘラー本体に差し込みます。



吸い込んだら、マスクで鼻と口を覆ったまま、ゆっくりと息を吐き出します。その後、**2、3回吸入します。**

吸入は立ち上がって行います。

マイクロヘラーに息がかからないように口から十分に離し、息を大きく吐き出します。

マイクロヘラーを水平にして、マスクで鼻と口をしっかりと覆います。



**7** インタールエアロゾル1mgは通常、1回に2噴霧分の吸入を行いますので、**4～6**の動作をもう1度繰り返してください。

- 吸入後は、うがいをする必要はありません。
- 吸入後、のどに軽い刺激がある時は、水を飲ませてあげると刺激はおさまります。

★裏面もお読みください。

インターエアロゾル1mgをご使用になる患者の皆様へ

# マイクロヘラーマスク付きのお手入れ方法

マイクロヘラーマスク付きは、専用アダプターやマスクと合わせて3日に1回洗浄し、完全に乾燥させてからご使用ください。

お手入れは、下記の①～⑦の手順で行ってください。

マイクロヘラーマスク付き本体から専用アダプターを取りはずします。



専用アダプターからお薬のポンベを取り出します。




本体はマスクをはずし、専用アダプターとともに、中性洗剤を入れたぬるま湯に15分くらい浸けます。



マスクと本体をぬるま湯ですすぎます。



専用アダプターは、ポンベのはめ込み口側と吸入口側の両方から、それぞれ1分くらいずつぬるま湯ですすぎます。

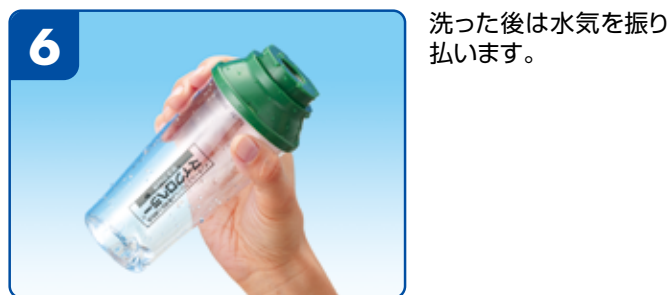

洗った後は水気を振り払います。



専用アダプター接続口を下にして立て、完全に自然乾燥させてください。

## ⚠ 気をつけていただきたいこと

- 初めて使用する時や、長期間使用しなかった後で使用する時には、必ず洗浄・乾燥を行ってからご使用ください。

★箱の中に説明書が入っていますので、使用前には必ずご覧ください。